

Hydrokolloid

medical-ph Hydrokolloid-Verband, steril, gelatinefrei, aus Hydrokolloid, mit einer semipermeablen, keimdichten Deckschicht aus Polyurethanfolie, einzeln eingeseigelt, auch mit Fixierrand aus Polyurethanfolie, mit einer Polyurethanschaum-Deckschicht für eine verbesserte Polsterwirkung und in einer dünneren Hydrokolloid-Ausführung mit geringerer Saugkapazität für eine bevorzugte Anwendung in der Epithelisierungsphase erhältlich.

Eigenschaften:

saugfähiges, selbsthaftendes Hydrokolloid, welches durch Aufnahme von Wundexsudat ein Gel mit einem ausgeglichenen feuchten Wundmilieu bildet

- semipermeable, keimdichte, transparente Deckschicht aus Polyurethanfolie
- gute Biokompatibilität
- fördert Granulation und Epithelisierung
- Entfernung des Hydrokolloid-Verbandes ohne Wundirritation

Anwendung:

Zur feuchten Wundbehandlung. Zur Versorgung klinisch nicht infizierter, schwach bis mittelstark sezernierender Wunden. Zur Versorgung von Wunden mit schlechter Heilungstendenz und bei langwierigem Granulationsaufbau, beispielsweise bei Ulcus cruris oder Dekubitus. Zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a. Verwendung spezifischer Zuschnitte für die Behandlung schwierig zu versorgender Problemzonen, beispielsweise von Dekubitalulcerationen im Sakralbereich oder zur Wundbehandlung an Ferse und Ellenbogen. Verwendung des medical-ph Hydrokolloid-Verbandes basic mit einer Polyurethanschaum-Deckschicht zur Erzielung einer verbesserten Polsterwirkung. Verwendung des dünneren medical-ph Hydrokolloid-Verbandes thin mit einer geringeren Saugkapazität vorzugsweise in der Epithelisierungsphase. Zur Befestigung des medical-ph Hydrokolloid-Verbandes wird eine Fixierung mit Fixierbinden oder mit hypoallergenem Fixierpflaster empfohlen. Der medical-ph Hydrokolloid-Verband mit Fixierrand eignet sich durch den umlaufenden, hypoallergenen Kleberand aus transparenter Polyurethanfolie zur sicheren und keimdichten Fixierung.